

取扱説明書

wellクッション

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1 ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品は車いす用のクッションです。安全にお使いいただくために、用途以外の使用はしないでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴をあけて廃棄してください。
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。
本製品は効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。
- 本製品を使用中の喫煙は、おやめください。
火種の落下などによりやけどや火災の原因となります。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。
専用カバー洗濯後など、十分乾燥していない状態で使用すると、カビの発生や皮膚トラブルの原因となります。
- 低温の環境下（10℃以下）では、ウレタンフォームが硬くなることがあります。
室温になじませてから使用してください。
- 本製品を正しい向きで車いすのシート（座面）に設置してください。
誤った向きに本製品を設置すると、効果がのぞめなかったり、体が左右に傾いたり、症状を悪化させるおそれがあります。

2 製品の特徴

- 密度の異なる3種のウレタンフォームを組み合わせたクッションです。車いす上での座圧を効果的に分散します。
- 車いすのシート（座面）のたわみを解消するため、本製品の最下層に船底型のベースシートを取り付けました。これにより安定した座位を保ちやすくなります。
- 車いすの座幅・座奥行きに合わせて12サイズからお選びいただけます。
- カバーは防水仕様で、銀イオンによる制菌・防臭・静電気防止加工を施しています。

3 ご使用方法

- 「FRONTIER」マークがひざ裏にくるように車いすのシート（座面）に設置してください。文字の上下に注意してください。

△警告 定期的に圧迫を開放してください。このクッションは効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢を続けると、床ずれの原因となります。

△注意 製品を取り出した際、においが気になる場合には、風通しの良いところで陰干しをしてから使用してください。

FRONTIER
マーク



4 お手入れの方法

- カバー……洗濯できます。右記の洗濯表示に従い、水洗いかドライクリーニングをしてください。

外カバーの
お手入れ方法



あて布使用

- クッション本体……洗濯できません。濡れてしまった場合は、風通しの良いところで陰干しをしてください。
- ※ ご使用によりウレタンフォームが変色することがありますが、品質特性に変わりはありませんので、そのままお使いいただけます。

5 仕様

製品名		wellクッション			
種類		奥行38cm	奥行40cm	奥行43cm	奥行46cm
本体外形寸法 (幅×奥行×厚み)	①	37.5×38×8cm	37.5×40×8cm	37.5×43×8cm	37.5×46×8cm
	②	40×38×8cm	40×40×8cm	40×43×8cm	40×46×8cm
	③	42.5×38×8cm	42.5×40×8cm	42.5×43×8cm	42.5×46×8cm
		(車いす上使用时厚み：約5.5cm)			
重量		約800g			
素材	本体	ウレタンフォーム			
	専用カバー	表面：ポリエステルニット(高撥水防水カバー)、裏面：すべり止め加工			

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリー
コール **0120-294-518**

千葉本部 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港 42-4
TEL. 043-301-8338



- アフターサービスのお問い合わせ

取扱店