

# 取扱説明書

## ジールクッション

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みにになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

## 1 ご使用上の注意



### 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り出した後、穴を開けて廃棄してください。  
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。  
このクッションは効果的に座圧を分散し、ズレを軽減しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。
- 製品をご使用中の喫煙は、おやめください。  
火種の落下などによりやけどや火災の原因になります。
- 中身を分解しないでください。  
ゲルがモレ出る可能性があります。



### 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態でご使用ください。  
カバー洗濯後など、十分乾燥していない状態ではカビの発生や皮膚トラブルの原因になります。
- 低温な環境下（10℃以下）では、ウレタンフォームが硬くなることがあります。  
室温になじませてからご使用ください。
- このクッションは座面用としてのみ使用してください。

## 2 製品の特徴

- ゲルとウレタンフォームを組み合わせたクッションです。車いす上で座圧を効果的に分散し、ズレを軽減して、床ずれを防止します。
- 車いすのシート（座面）のたわみを解消するため、本製品の裏面は船底の形状にしています。これにより安定した座位を保ちやすくなります。
- カバー生地には、通気性、防水性を施しています。
- カバー全体がどの方向にも伸びるため、より体にフィットします。
- ご使用によりウレタンフォームが変色することがありますが、品質特性に変わりはありませんので、そのままお使いいただけます。

## 3 ご使用方法

- ファスナーがひざの裏にこないようにして、車いすに設置してください。
- 製品を取り出した際、においが気になる場合には、風通しの良いところで陰干しをしてからご使用ください。
- 「FRONTIER」マークがひざ裏にくるように設置してください。文字の上下に注意してください。

**△警告** 定期的に圧迫を開放してください。このクッションは効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。

FRONTIER  
マーク



## 4 お手入れの方法

- カバー…洗濯できます。水洗いをしてください。
- クッション本体…洗濯できません。濡れてしまった場合は、風通しの良いところで陰干しをしてください。

## 5 仕様

製品名	ジェルクッション		
本体外形寸法	幅・奥行	①40×40cm ②40×38cm ③38×40cm ④38×38cm	
	厚み	6.3cm	
重量	約1.8kg		
素材	クッション本体	ウレタンフォーム、ゲル	
	カバー	表面：ポリエステル(防水カバー) 裏面：すべり止め加工	

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 株式会社フロンティア

フクシのクトハ

フリー  
コール **0120-294-518**

福祉事業本部 〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港42-4  
TEL.043-301-8338



### ●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店