

取扱説明書

アクトモア アームサポート スイングタイプ / スイング&エレベータィングタイプ

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1 ご使用上の注意



警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いを理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書に書かれた内容を理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介助者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 本製品を持って車いすを持ち上げたり、移動したりしないでください。



注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 本来の用途以外で使用しないでください。
荷物を掛けたりすると本製品が外れたり、車いすのバランスが悪くなり転倒するおそれがあります。
- 体に無理のかかる体勢で使用しないでください。
- 必ず適応したサイズの車いすに取り付けてください。
- 本製品を火気に近づけないでください。
上面のサポートパッドが燃えたり、熱くなった金属部でやけどをするおそれがあります。

2 製品の特徴

- サポートパッドの位置を前後・左右に調整することができます。
- サポートパッドのひじ側を支点として、手首側を左右にスイングさせることができます。
- サポートパッドのくぼみ形状でひじをやさしく支えます。
- スイング&エレベータィングタイプはひじ側を支点として、手首側をエレベータィングさせることができます。

3 ご使用方法

1. 取り付けかた

スイングタイプ / スイング&エレベータリングタイプ共通

- ① 車いすのアームサポートパッドを取り外します。
- ② 本製品の裏面にあるパイプ取り付け金具のネジ2ヶ所を、専用の六角レンチ（3/16インチ）で取り外してください。
- ③ パイプ取り付け金具を車いすのパイプに挟むように差し込み、本製品のサポートパッド上面が水平になるように調整し、ネジ2ヶ所を締めて固定してください。

[スイングタイプ]



[スイング&エレベータリングタイプ]



- ※ 本製品のサポートパッドのくぼみにひじが無理なくおさまるよう、本製品の奥行位置を調整してください
- ※ 取り外す際は、取り付けかたの逆の手順で行ってください

△注意 ご利用の車いすへの取り付け可否の確認は、当社まで連絡してください。

2. 適合調整

スイングタイプ

サポートパッドの位置を前後、左右に調整できます。また、ひじ側を支点として手首側を左右にスイングさせることもできます。

■前後・左右位置の調整方法

- ① ノブネジを取り外します。
- ② サポートパッドの裏面には、ノブネジを通すための穴があります。うでをのせやすい位置に合わせ、取り付け位置を前後3つ、左右3つの穴から選び、ノブネジを通してください。
- ③ サポートパッドの前後調整は最大17.5cmのスライドが可能です。身体状況に合わせ、前後の位置を調整してノブネジを締めて固定してください。



■スイングのしかた

- ① ノブネジをゆるめます。
- ② サポートパッドのひじ側を支点として、手首側を左右にスイングさせます。
- ③ うでをのせやすい位置に合わせた後、ノブネジを締めて固定してください。



① ノブネジ



②外側・内側にスイング

スイング&エレベータィングタイプ

サポートパッドの位置を前後、左右に調整できます。また、スイングやエレベータィングさせることもできます。

■前後位置の調整方法

- ① 前後調整用ネジを専用の六角レンチ（3/16インチ）でゆるめます。
- ② サポートパッドの前後調整は最大6.5cmのスライドが可能です。うでをのせやすい位置に合わせた後、ネジを締めて固定してください。



① 前後調整用ネジ




②後ろに合わせた状態



②前にスライドさせた状態

■左右位置の調整方法

- ① サポートパッドの裏面には、ネジを通すための穴があります。うでをのせやすい位置に合わせ、取り付け位置を左右3つから選び、ネジ2ヶ所を専用の六角レンチ（3/16インチ）で仮締めしてください。
- ② サポートパッドの左右調整は最大3.5cmのスライドが可能です。身体状況に合わせ、左右の位置を調整してネジ2ヶ所を締めて固定してください。

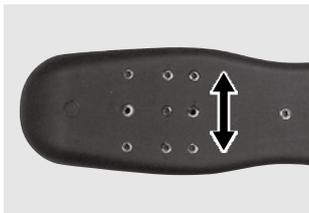

①



①



②内側にスライドさせた状態



②外側にスライドさせた状態

■スイングのしかた

- ① スイングレバーをゆるめます。
- ② サポートパッドのひじ側を支点として、手首側を左右にスイングさせます。
- ③ うでをのせやすい位置に合わせた後、スイングレバーを締めて固定してください。



① スイングレバー




②外側・内側にスイング

■エレベータリングのしかた

- ① エレベータリングレバーをゆるめます。
- ② サポートパッドのひじ側を支点として、手首側をエレベータリングさせます。
- ③ うでをのせやすい位置に合わせた後、エレベータリングレバーを締めて固定してください。

⚠注意

本製品をスイングした状態で車いすのアームサポートを跳ね上げないでください。アームサポートを最後まで跳ね上げることができず、体に接触しケガをするおそれがあります。

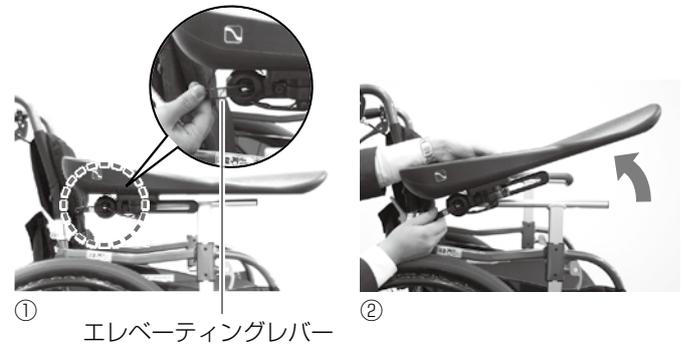

エレベータリングレバー


3. 「右用」・「左用」の設定変更

スイング&エレベータリングタイプ

スイング&エレベータリングタイプは左右どちらにも取り付けが可能です。

[右用→左用へ変更の場合]

- ① スイングレバーをゆるめます。
- ② Aの金具を右図のように180度回転させ、スイングレバーを固定してください。
- ③ 前後調整用ネジを専用の六角レンチ（3/16インチ）で取りはずします。
- ④ Bの金具を右図のように180度回転させ、前後調整用ネジを締めて固定してください。

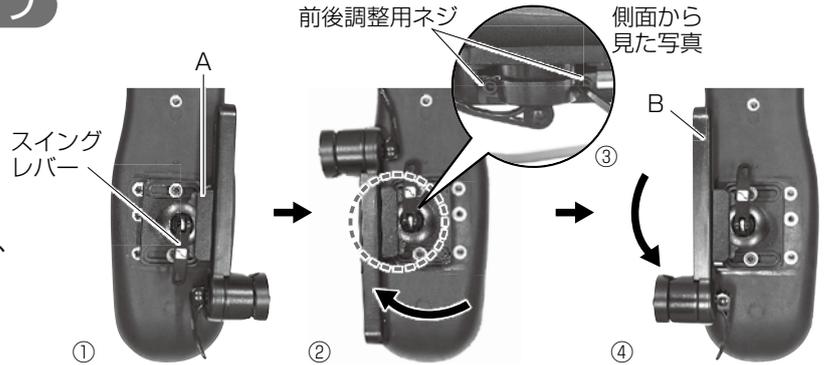

4 日常のお手入れ

- ご使用前には必ずネジのゆるみを点検し、ゆるんでいるときは増し締めをしてください。
- 汚れた場合は水を含ませた布で拭き、汚れを取り除いてください。

5 仕様

製品名	アクトモア アームサポート	
タイプ	スイングタイプ	スイング&エレベータリングタイプ
本体外形寸法（全幅×奥行×高さ）	13.8cm × 53cm × 7.7cm	
ひじ部の深さ	最大5cm	
材質	サポートパッド：ポリウレタン	

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フクシのこトハ

フリーコール **0120-294-518**

福祉事業本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL.043-301-8338



●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店