

# 取扱説明書

## リバティークッション

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。  
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項  
や使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がありましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

### 1. ご使用上の注意

#### ⚠ 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。  
取扱説明書が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 包装用ポリ袋は、製品を取り外した後、穴をあけて廃棄してください。  
ポリ袋を誤ってかぶったりすると、窒息する危険があります。
- 定期的に圧迫を開放してください。  
このクッションは効果的に座圧を分散しますが、長時間同一姿勢の座位を続けると、床ずれの原因となります。
- 本製品を使用中の喫煙は、おやめください。  
火種の落下などによりやけどや火災の原因となります。

#### ⚠ 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。  
専用カバー洗濯後など、十分乾燥していない状態ではカビの発生や皮膚のトラブルの原因となります。
- 本製品を正しい向きで車いすのシート（座面）に設置してください。  
誤った向きに本製品を設置すると、効果がのぞめない、姿勢が崩れやすくなる、症状を悪化させるなどのおそれがあります。
- 本製品の近くで鋭利なもの（安全ピンなど）を使用する場合は十分注意してください。  
穴があき、スマートセルの空気漏れやゲルが流れ出るおそれがあります。
- 本製品は車いす座面用のクッションです。  
安全にお使いいただくため、用途以外の使用はしないでください。
- 分解はしないでください。
- 低温な環境下（-10度以下）や高温な環境下（50度以上）では使用しないでください。
- 本製品の上に、重い物をのせないでください。
- 直射日光の当たるところに保管・放置しないでください。

## 2. 製品の特長

- 液状ゲルとスマートセルを組み合わせた軽量の薄型クッションです。
- 座ると空気自動排出孔から自動で空気が抜け、ゲルによってスマートセルが滑らかに動いて体に沿った形状になります。



## 3. ご使用方法

専用カバーのファスナーがある側を、後ろ側に向けて車いすのシート（座面）に設置してください。

### ⚠ 注意

- 本製品を正しい向きで車いすのシート（座面）に設置してください。
- 必ず専用カバーを取り付けてご使用ください。



## 4. お手入れの方法

① 専用カバーのファスナーを空けてクッション本体を取り外します。

【専用カバー】

洗濯できます。洗濯表示に従ってください。

- 低い温度でのタンブル乾燥ができる（排気温度上限60度）
- ドライクリーニング禁止
- 塩素系及び酵素系漂白剤の使用禁止
- アイロン禁止

【洗濯マーク】



### ⚠ 注意

- 蒸気洗浄やアイロンなどは使用しないでください。
- 乾燥した清潔な状態で使用してください。

【クッション本体】

中性洗剤を使い湿らせた布で拭いてください。

### ⚠ 注意

洗濯機で洗わないでください。また水や他の液体に浸けないでください。

② お手入れが終わったらクッション本体を専用カバーへ戻します。空気自動排出孔が前側になるように入れてください。

## 5. 仕様

製品名	リバティークッション	
本体外形寸法	幅	38・40・43cm
	奥行×厚み	40×5cm
重量	約480g	
素材	中材	液状ゲル、スマートセル
	専用カバー	ポリエステル（裏面：すべり止め加工）

■製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

# 株式会社フロンティア

フリーコール 0120-294-518

千葉本社 福祉本部 〒261-0002  
 千葉県千葉市美浜区新港4-2-4  
 TEL: 043-301-8338

● アフターサービスのお問合せ

取扱店